

Инструкция по применению



Нагревание

Чтобы клей подействовал, перед нанесением нагрейте наклейку до температуры тела (не менее 37°C).



Место нанесения

Идеальное место – перед корнем хвоста. Положение – перпендикулярно хребту.



Очистите шерсть щеткой

Счистите грязь, пыль и линяющую шерсть щеткой по направлению роста шерсти. «Эстротект» необходимо наклеивать на чистую и прочно держащуюся шерсть!



Протрите шерсть

Тщательно протрите область нанесения мягкой, впитывающей тканью, чтобы полностью удалить остатки грязи, пыли или песка.



Наклеивание «Эстротекта»

Поместите наклейку на поверхность шерсти, крепко прижмите и пригладьте рукой с усилием, втирающими движениями.

ESTROTECT™

HEAT DETECTOR

Как работает «Эстротект»

Самоклеящиеся индикаторы охоты «Эстротект» наносятся на крестец между тазовой костью и корнем хвоста.

Серебристый защитный слой стирается каждый раз, когда помеченное животное допускает садку.

Такое поэтапное стирание (см. рис. ниже) знаменует собой стадии охоты.

Чем больше видна цветная подложка, тем ярче животное проявляло рефлекс неподвижности и тем меньше вероятность ложноположительного сигнала.



«Эстротект» после одной садки



«Эстротект» после 3-5 садок



«Эстротект» после более чем 5 садок